

JAK NA TO:
NAVOD
EMSZERO

LUNAFIT | DIGIFIT

JAK NA TO:

NÁVOD PRO

EMS

ZERO, SLIM,

PORTABLE, MINI

Nejprve bych rád vyjádřil své srdečné poděkování zákazníkům, kteří si zakoupili naše stroje. Tato příručka je sepsána pro zákazníky, aby mohli tento přístroj lépe používat. Chcete-li přístroj správně používat, zabránit poškození provozu a uživatelů, chránit přístroj před poškozením a předejít zbytečným škodám na majetku, přečtěte si před použitím návod.

Pokud kosmetická instituce používající tento přístroj nemůže přístroj správně obsluhovat, může to způsobit selhání funkce přístroje a může ohrozit lidské zdraví.

Tento výrobek musí být používán přísně v souladu s pokyny v tomto návodu a společnost nenese odpovědnost za všechny následky způsobené nesprávným použitím jiných metod, než jsou ty, které jsou uvedeny v tomto návodu.

PRINCIP PŘÍSTROJE:

Pomocí technologie elektromagnetických vln dochází k neustálému roztahování a stahování svalů, to vede k provádění extrémního tréninku, hluboké remodelaci vnitřní struktury svalů, tedy růstu svalů a generování nových proteinových řetězců a svalových vláken pro trénink a zvýšení svalové hustoty a objemu.

100% extrémní svalová kontrakce elektromagnetických impulzů může vyvolat odbourávání velkého množství tuku a mastné kyseliny se rozkládají a vytékají z triglyceridů a hromadí se v adipocytech. Příliš vysoké hladiny mastných kyselin způsobují odumírání tukových buněk a jejich vyloučení normálním metabolismem těla během několika týdnů.

1.

PARAMETRY PŘÍSTROJE

Vstupní napětí	220-230V /50-60Hz
Výstupní výkon	5000-6000W
Provozní frekvence	5-100Hz
Váha	Dle modelu od 50Kg
Velikost	Dle modelu - 40*40*100cm

2.

ZAPOJENÍ PŘÍSTROJE

Zapojení
model.
Dle modelu
2/4 madla.



Vstupní
napájení a
mechanické
zapnutí
přístroje

3.


NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

- V první řadě zapojíme madla do přístroje a zajistíme je pojistkou. Dle typu modelu zapojíme 1x madlo, 2x madlo či 4x madlo.
- U určitých modelů najdete v balení i inkontinenční podložku, lze ji však rovněž dokoupit. Podložka se vždy zapojuje místo jednoho libovolného madla.
- Přístroj zapojíme do zásuvky pomocí dodaného 3pin kabelu.
- Zapneme přístroj vypínačem ze zadní strany (může se lišit dle modelu)
- Po zapnutí přístroje přejdeme k přední části k nastavení přístroje.



Display -
sloužící k
ovládání a
nastavení
přístroje

- Při prvním spuštění přístroje nastavte datum a čas, jazyk, pokud chcete zvukovou signalizaci (ve výchozím stavu povolena) a jas displeje. Kalibrace madel není potřebná při prvním spuštění.

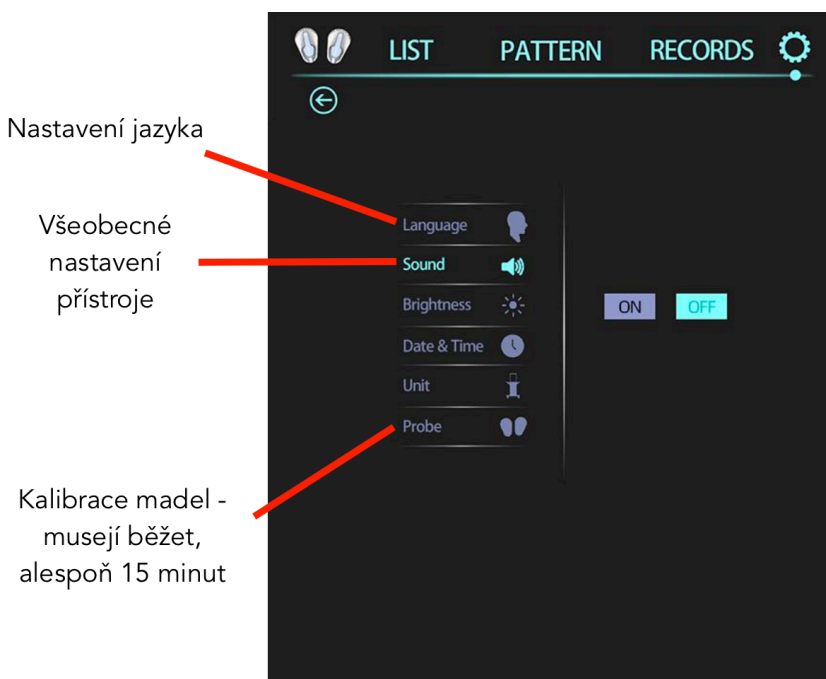

- V dalším kroku vyberte LIST a nastavíte parametry uživatele (tato volba není povinná)

V provozním režimu nastavíme parametry pro proceduru.

LIST PATTERN RECORDS

← Pattern 1

TYPE

New to practice Existing to practice New treatment Ongoing treatment

AGE GROUP

<30 30-39 40-49 50-59 60+

GENDER

Female Male


REGION

Abdomen Buttocks Other


- Na úvodním displeji vyberete jednu z možností.

Zvolte
jednu z
možností

Volba č.1 jsou
rovnoměrné
impulsy.
Volba č.2 jsou
stupňované
impulsy s možností
variabilního
nastavení

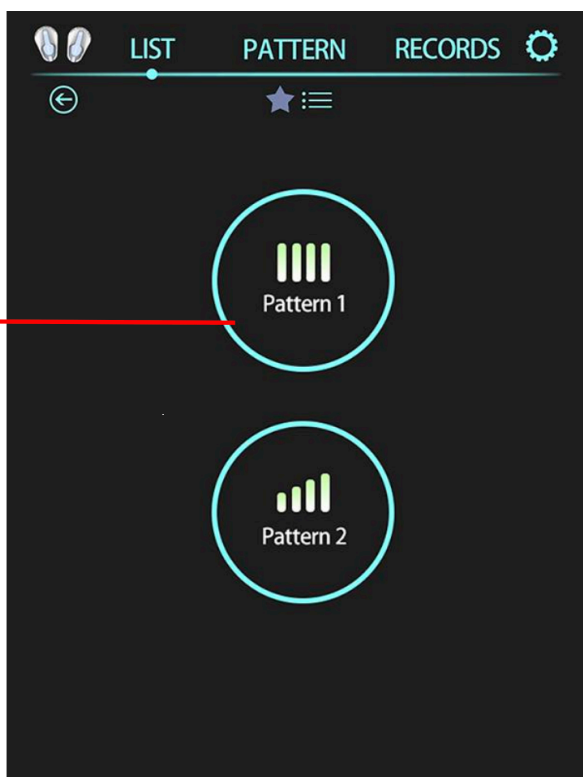

- Po zvolení jedné z možností nastavíte intenzitu a sílu elektromagnetických vln na každém příslušném madle (dle zvolené verze přístroje).
- Nastavení časomíry procedury. Doporučená délka procedury je od 15 do 30 minut v závislosti na síle vln a intenzitě.

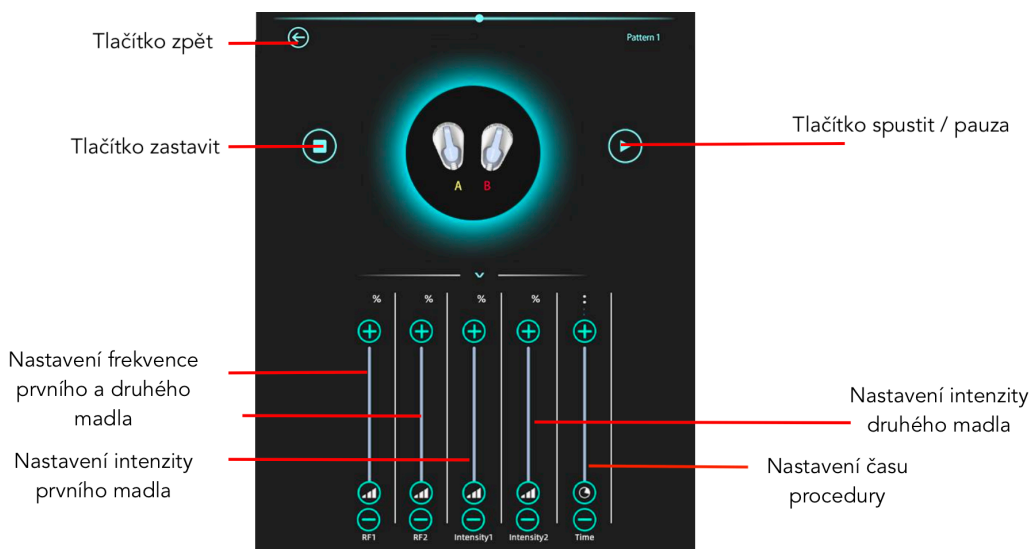


4.

KOMPLIKACE A PORUCHY

V případě komplikací s intenzitou modelů nebo jejich výkonem proveďte jejich kalibraci v nastavení přístroje.

V případě dalších nebo jiných komplikací kontaktujte svého prodejce.

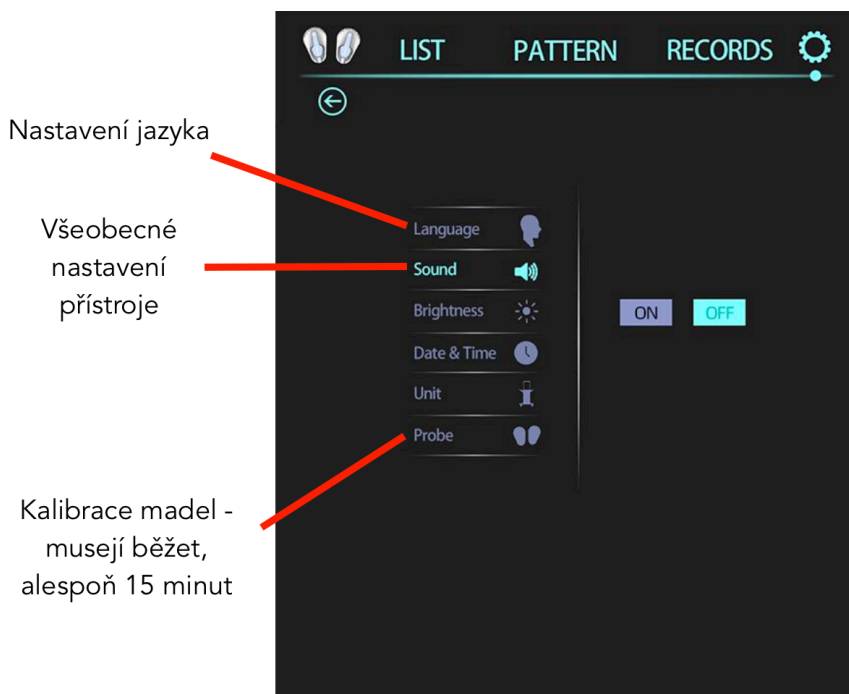

5.

PÉČE O STROJ

Zařízení v případě nečistot otírejte vlhkým hadrem. Nečistoty ze stroje myjte pravidelně vždy, když je přístroj odpojen od elektrické sítě.

Zařízení nikdy nesmí být v provozu ve vlhkém nebo mokřém prostředí. Hrozí smrtelný úraz elektrickým proudem.

Zařízení nerozebírejte ani neupravujte bez souhlasu výrobce nebo prodejce.

Neodborný zásah do zařízení je porušením záručních podmínek a uživatel tak dělá na vlastní nebezpečí.

6.

SERVIS PŘÍSTROJE

V případě nutnosti a potřeby servisu přístroje kontaktujte svého prodejce.

7.

DOTAZY

V případě dotazů ohledně fungování, servisních prohlídek můžete kontaktovat svého prodejce.

Prodejce je poučen a zaškolen pro tyto případy a je seznámen s veškerými platnými postupy dle legislativ a norem pro servis zařízení EMS v EU.

Dotazy ohledně fungování strojů EMS a dalších otázek můžete kontaktovat svého prodejce na

TELEFON:	
E-MAIL:	

8.

OBSAH BALENÍ

ZAŘÍZENÍ	EMS - DLE MODELU	
MADLA	2X, 4X (DLE MODELU)	
POPRUHY	8X80CM 8X90CM 8X100CM (DLE MODELU)	
NAPÁJECÍ KABEL DO SÍTĚ	1X	
DOKUMENTY	OSVĚDČENÍ, CERTIFIKACE A MANUÁL	

